



Etac Swift Commode

3 en 1 - Chaise de douche, chaise percée et rehausseur de toilettes

 **etac**[®]

Chaise/tabouret 3 en 1 Swift Commode

La chaise de douche Swift est un produit polyvalent qui peut être utilisé comme chaise percée, chaise de douche et surélévateur de toilettes. Elle convient parfaitement aux personnes qui ont besoin d'un accès aux toilettes près du lit car elle offre une fonctionnalité associée à une conception discrète s'intégrant parfaitement à la chambre. La chaise de douche convient également à la salle de bain car elle est compatible avec les environnements humides et peut être utilisée sous la douche et au-dessus des toilettes.

Fonctionnalité trois en un

Dans la chambre, Swift Commode est une chaise percée. Ses coussins d'assise et de dossier sont amovibles et dissimulent un bassin avec couvercle autobloquant. Elle peut être utilisée comme chaise de douche dans la salle de bain, avec ou sans les coussins. Elle sert de surélévateur de toilettes sur pied lorsqu'elle est placée au-dessus des toilettes. Son réglage sur 7 positions permet de s'adapter à toutes les hauteurs de toilettes et ses accoudoirs robustes sécurisent l'utilisateur.

Grande flexibilité

La chaise de douche Swift est légère et facile à déplacer de la chambre à la salle de bain. Elle peut accueillir des utilisateurs à forte corpulence pesant 160 kg maximum. La hauteur d'assise est réglable de 42 et 57 cm et peut être légèrement inclinée vers l'avant pour faciliter la verticalisation.

Montage et nettoyage faciles

La chaise de douche Swift est facile à assembler et ne nécessite pour cela aucun outil. Les accoudoirs et le dossier peuvent être facilement retirés ce qui simplifie le nettoyage. La chaise présente des surfaces lisses et ne rouille pas. Le bassin est inclus de série.



Chaise/tabouret 3 en 1 Etac Swift Commode

Référence

Chaise/tabouret 3 en 1 Swift Commode avec coussins
Chaise/tabouret 3 en 1 Swift Commode sans coussins

81702030
81702060

Poids

5,4 kg (12 lb)

Poids maximal de l'utilisateur

160 kg (353 lb)

Entretien



Nettoyez/désinfectez le produit à l'aide d'un détergent non abrasif standard dont le pH est compris entre 5 et 9, ou avec une solution désinfectante à 70 %. Le produit peut être nettoyé en toute sécurité dans un laveur-désinfecteur à 85 °C pendant 3 minutes.



Dimensions

Largeur totale : 56 cm (22")
Largeur du siège : 54 cm (21 3/4")
Hauteur du siège : 42-57 cm (16 1/2"-22 1/2")
Distance entre les accoudoirs : 45 cm (17 3/4")

Matériaux

Siège, dossier et accoudoirs : polypropylène
Pieds : aluminium et polyamide
Emboutis : TPE
Coussins de dossier et d'assise : polyéthylène et nylon

Caractéristiques



Réglage de la hauteur

Les pieds télescopiques se règlent rapidement à la hauteur souhaitée en enclanchant simplement un bouton autobloquant. La forme ovale permet d'éviter que les pieds ne tournent lors du réglage. Aucun risque d'égarer ou de mal remonter une pièce.



Fiabilité et stabilité

Grâce à sa large surface, la chaise est extrêmement stable et peut facilement accueillir un utilisateur de 160 kg maximum. Les embouts antidérapants et sensibles des pieds s'adaptent au sol et offrent une excellente adhérence sur les surfaces humides ou irrégulières.



Manipulation aisée

La chaise de douche Swift est livrée démontée dans un carton de transport. Comme la chaise est facile à monter et à démonter, le carton peut être conservé et servir à d'autres transports si la chaise est utilisée dans plusieurs lieux ou environnements.



Bassin avec couvercle autobloquant intégré

Le bassin, dont le couvercle est équipé d'un dispositif de verrouillage sécurisé, s'intègre parfaitement au siège. Le bassin est équipé d'une poignée à l'arrière et d'une poignée verticale qui verrouille automatiquement le couvercle lors de son transport. Il s'installe par le dessus.



Chaise/tabouret de douche Swift sans bassin



Chaise/tabouret de douche Swift avec bassin

Accessoires



Porte-savon/support pour couvercle

80209266

Se fixe sur le côté du siège. Idéal pour ranger gel douche, le shampooing, le couvercle du bassin ou le papier toilette. Également équipé d'un support de douche intégré.

Matériau : polypropylène



Coussin d'assise

84005064

Le coussin d'assise antidérapant procure une sensation de chaleur instantanée et rend l'assise plus confortable. Facile à essuyer.

Matériau : polyéthylène



Protection anti-éclaboussures

80209430

La protection anti-éclaboussures offre une protection douce à l'avant pour éviter les éclaboussures. Se fixe à l'avant du siège et s'enlève facilement.

Matériau : polyuréthane



Coussin de dossier

84005065

Installé sur le dossier pour plus de confort et une sensation de chaleur. Il est antidérapant, facile à clipser et à nettoyer.

Matériau : polyéthylène



Fondé en 1973, Etac est un leader mondial spécialisé dans la conception et la production d'aides techniques ergonomiques et d'équipement d'aide à la mobilité des personnes. Notre objectif est de proposer des solutions qui optimisent la qualité de vie des personnes, de leur entourage et des soignants.

Restez informés de nos dernières nouveautés
en consultant notre site internet : www.etac.com.