

## Chaise Etac Swift Mobile Tilt inclinable

Dotée d'une fonction d'inclinaison vers l'arrière.

La chaise Etac Swift Mobile Tilt est disponible en deux modèles avec inclinaison par vérins pneumatiques et inclinaison par vérins électriques. Ces deux modèles présentent les mêmes caractéristiques que la chaise Etac Swift Mobile (se reporter à la page 28). Le modèle Swift Mobile Tilt existe aussi en version bariatrique 160 kg (voir page 34).

### Inclinaison depuis le côté

La fonction inclinaison s'active depuis le côté de la chaise Etac Swift Mobile. Le soignant, tout en bénéficiant de conditions de travail ergonomiques peut ainsi garder le contact visuel et la communication avec le patient.

### Redressement assisté en position verticale

Les pistons à gaz pneumatiques permettent de ramener le siège en position verticale. Lors du basculement, le corps du patient fait office de contrepois et le mouvement s'effectue donc en douceur. Le risque de blessure pour le personnel soignant est très réduit. La hauteur d'assise se règle manuellement, sans outil, de 50 à 65 cm sur 7 positions, espacées chacune, de 2,5 cm.




*Une chaise en position inclinée est plus stable et simplifie la dispense de soins.*



### Fonction d'inclinaison électrique pour des manœuvres pratiques et en douceur


La chaise de douche et de toilettes Etac Swift Mobile Tilt existe également en version inclinaison électrique. La fonction inclinaison se règle à l'aide d'une télécommande. Ainsi, l'utilisateur peut ainsi garder le contrôle sur le basculement. Dans la mesure où le moteur est peu encombrant, le positionnement de la chaise de douche sur les toilettes demeure possible. L'utilisation de la chaise dans la douche est autorisée et un chargeur de batterie distinct est inclus.

## Caractéristiques

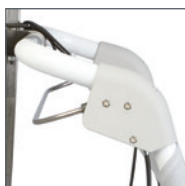

### Barre d'inclinaison unique

La barre qui actionne l'inclinaison est facile d'accès d'un côté comme de l'autre.

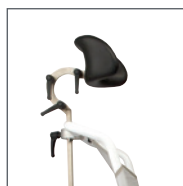

### Repose-tête articulé

Réglable, le repose-tête délivre un soutien confortable et relaxant. Livré en standard.





### Contact visuel tout au long de l'inclinaison

La fonction exclusive de basculement garantit une position de travail ergonomique au soignant, qui peut maintenir le contact visuel avec le patient.



### Inclinaison électrique

Améliore les conditions de travail du personnel soignant. Grande maniabilité grâce à la télécommande.

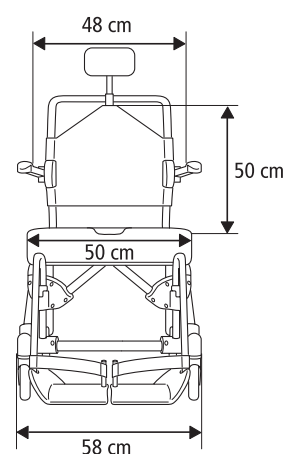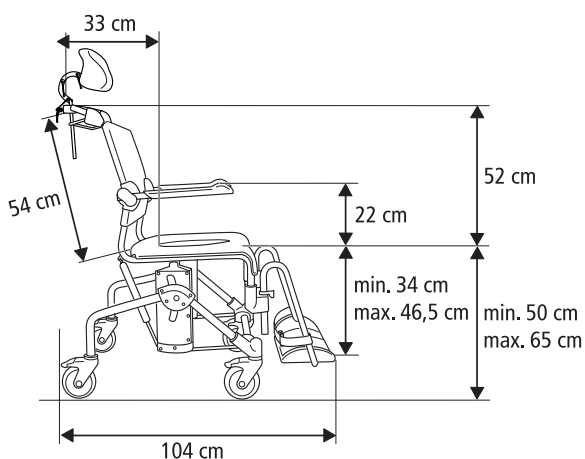

## Accessoires

Découvrez notre vaste gamme d'accessoires, « Accessoires pour tous les modèles Swift Mobile », page 36

### Description de la chaise Etac Swift Mobile

#### Tilt

Swift Mobile Tilt	80209410
Swift Mobile Tilt avec support seau	80209411
Swift Mobile Tilt avec support bassin	80209412
Swift Mobile Tilt électrique	80209490
Swift Mobile Tilt électrique avec support seau	80209491
Swift Mobile Tilt électrique et support bassin	80209492

Standard : repose-tête, dossier, accoudoirs, assise, repose-pieds, sangles pour chevilles et 4 roulettes verrouillables.

#### Dimensions

Inclinaison réglable : la plage d'angles 0° - -35° peut être remplacée par 5° - -30°.

### Matériaux

Pistons : capacité de levage 130 N  
Pour les autres matériaux, consulter la « Chaise de douche et de toilettes Etac Swift Mobile », page 28


### Poids

19,7 kg  
Avec moteur : 23,6 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70%. Décontamination possible à 85°C maximum si nécessaire.


## Accessoires pour tous les modèles Swift Mobile

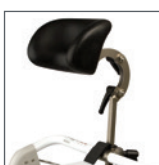

### Repose-tête articulé

80209447

Complet avec fixations. Réglable à la fois en hauteur, en profondeur et latéralement. De série sur les modèles inclinables. Matériaux : polyuréthane, acier inoxydable et zinc. Lavage à 85°C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.

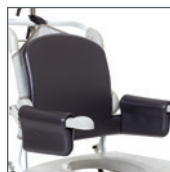

### Coussin dossier et accoudoirs

80209455


Dossier souple avec coussins d'accoudoirs intégrés. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Kit d'élargissement des accoudoirs

La paire : 80209441

Pour augmenter l'espace entre les accoudoirs de 6 cm. De série sur les chaises Swift Mobile/Tilt 160.

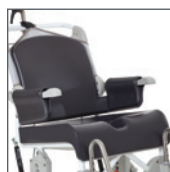

### Kit Comfort

80209457

Inclut le coussin d'assise percée confort (ref : 80209227) et le coussin dossier et accoudoirs (80209228). Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Accoudoirs pour hémiplegique

La paire : 80209035

Compatible avec les côtés gauche et droit. Matériau : polyéthylène cellulaire, aluminium, acier inoxydable, polystyrène.



### Coussins pour accoudoirs - lot de deux

80209508

Ces manchettes procurent un appui doux pour les bras. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Kit blocage accoudoirs

La paire : 80209445

Bloque l'accoudoir en position horizontale. Matériau : acier inoxydable.



### Soutien latéral

80209509

À largeur réglable. Matériaux : polyester, velcro, polyéthylène. Lavage à 60 °C max.



### Coussin de dossier souple

80209448

Chaud, doux et hydrofuge. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Coussin souple avec ouverture standard

80209065

Matériau : polyéther/housse revêtue étanche



### Coussin d'assise plein Comfort

80209434

Lorsqu'un siège sans trou est nécessaire. Matériau : mousse de polyuréthane. Lavage à 85°C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool



### Coussin souple avec ouverture ovale

80209067

Matériau : polyéther/housse revêtue étanche



### Coussin d'assise percé Comfort

Avec ouverture largeur 15 cm : 80209507

Avec ouverture largeur 18 cm : 80209506

Matériau : polyuréthane. Lavage à 85 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Sangle pectorale

80209442

Réglable en longueur. À fixer sur le dossier. Se combine systématiquement avec la ceinture de positionnement. Matériau : polyester.



### Coussin anti-escarres

80209245

Coussin pneumatique ROHO avec d'excellentes propriétés de répartition de la pression. Pression de l'air réglable. Largeur de la découpe anatomique : 21 cm. Matériau : néoprène. Température de lavage max. : 60 °C.



### Barre de maintien

Longueur : 60,5 cm : 80303034

Longueur : 66,5 cm : 80209452

Pour une sécurité et un soutien supplémentaires. Matériaux : aluminium, polypropylène et polyéthylène cellulaire. Remarque : la barre de 66,5 cm convient aux Swift Mobile 160 et Swift Mobile Tilt 160.

**Ceinture de positionnement**

80209440

Réglable en longueur.  
Fixation par sangles velcro.  
Matériau : polyester

**Repose-jambe avec élévateur et repose-mollet**

80209437

Compatible avec les côtés gauche et droit.  
Matériau : ABS.

**Pare-éclaboussures**

80209430

Se fixe dans l'ouverture de la découpe anatomique. S'installe une fois que l'utilisateur a pris place dans le fauteuil.  
Matériau : polyuréthane

**Repose-pieds pour un soutien des jambes et des mollets**

80209443

Compatible avec les côtés gauche et droit.  
6 hauteurs au choix.  
Matériau : acier inoxydable, polypropylène.

**Attache pour support bassin/seau**

Kit de 4 pièces : 80209435

À monter sous le siège.  
Matériau : polyamide.

**Support de jambes**

1 unité : 80209446

Support de jambes avec repose-pieds pliable et angle d'inclinaison réglable. Sangle pour chevilles non fournie.

**Support bassin**

80209257

Compatible à la fois avec le bassin fourni et les bassins à usage hospitalier standard à rebord fin. Une fixation est indispensable.  
Matériau : polyamide.

**Cale-talonnères**

La paire : 80209432

Réglables en longueur.  
Matériau : polyester

**Bassin**

80209254

**Bassin avec couvercle et poignée**

80209255

Matériau : polypropylène.

**Dispositifs antibascule - lot de deux**

Sans la fixation pour Swift Mobile 24" :  
80209438

Avec la fixation  
(pour Swift Mobile) : 80209439  
(pour Swift Mobile Tilt) : 80209459  
Améliore la sécurité si le centre de gravité est loin derrière, par exemple, dans le cas des utilisateurs amputés d'un membre inférieur.  
Matériau : aluminium

**Support seau**

80209258

Compatible avec les seaux à rebord épais. Une fixation est indispensable.  
Matériau : polypropylène.

**Aide au franchissement**

80209449

Pour un franchissement facile des seuils et d'autres obstacles

**Seau avec poignée et couvercle**

80302026

Matériau : polypropylène

**Kit de grandes roues arrières**

80209436

Roues arrière de 24 pouces avec pneus increvables. Avec fixation intégrée pour dispositif antibascule.  
Matériaux : polyamide, acier inoxydable.  
Fixations et freins inclus. Non compatible avec Swift Mobile 160 et Swift Mobile Tilt.

**Attaches pour fixation basse du bassin/seau**

80209259

À fixer sur le support pour bassin/seau.  
Matériau : polypropylène.

**Moteur d'inclinaison**

80209499

Pour Swift Mobile Tilt uniquement.  
Télécommande et chargeur inclus.

**Support jambes pour personne amputée**

80209510

À hauteur, longueur et inclinaison réglables.  
Compatible avec les côtés gauche et droit.